

Nepietiekams paraugs

Ja sportists nevar nodot pietiekami daudz urīna, nepietiekamais paraugs jāaizzīmogo un jāglabā līdz tiek nodots papildus paraugs.

Sastāvs

- 1 plastikāta maisiņš ar numuru
- 1 balts plastmasas aizbāznis
- 1 instrukcija

Lietošanas instrukcija

- Savākto urīnu pārlejiet B pudelītē.
- Aizveriet pudelīti ar balto plastmasas aizbāzni.
- Atstājiet sarkano gredzenu uz pudelītes.
- A pudelīte paliek neatvērta.

- Uzlieciet numurēto drošības korķīti uz pudelītes, to neaizgriezot.

- Ielieciet visu atpakaļ kartona kastē un to aizveriet.

- Kastīti ielieciet plastikāta maisiņā tā, lai pudelītes būtu stāvas!
- Aizlīmējiet plastikāta maisiņu, noņemot uzlīmi no līmējošās daļas un saspiežot abas maisiņa malas kopā.
- Tagad BEREG-KIT komplekts ir uz laiku aizzīmogots.

Uzmanību:

Uzglabāšanas temperatūra: mērenā temperatūrā no 0 ° C līdz + 40 ° C.

