

Asins analīzes

BEREG-KIT small single komplekta lietošanas instrukcija (ar vienu trauciņu)

BEREG-KIT komplekts


- Katrs BEREG-KIT ir iepakots plastikāta maisiņā. Un plastmasas trauciņš arī ir aizsargiepakojumā.
- Komplekts BEREG-KIT ir numurēts ar unikālu numuru – uz plastikāta maisiņa, trauciņa un tā vāciņa un uzlīmēm. Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, lai šie numuri sakristu!
- Katrā komplektā ir 1 ūdensizturīgs maisiņš ar mitrumu absorbējošu maisiņu – parauga transportēšanai uz laboratoriju.




Drošības korķītis

Pārliecinieties, ka korķītim ir visas sastāvdaļas:


- melns aizbāznis
- pelēka atspere
- pelēks metāla gredzens

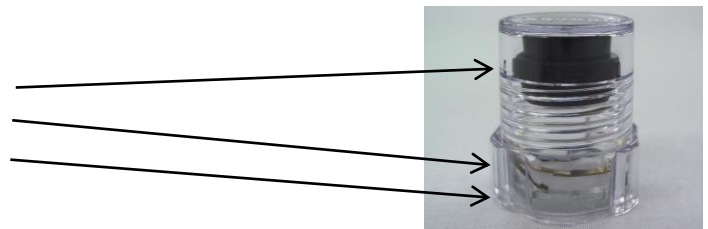

Sarkanais gredzens

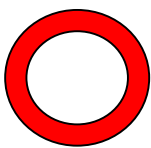

UZMANĪBU svarīgi!!!
Lūdzu **noņemt sarkano gredzenu pirms aizskrūvēšanas!**

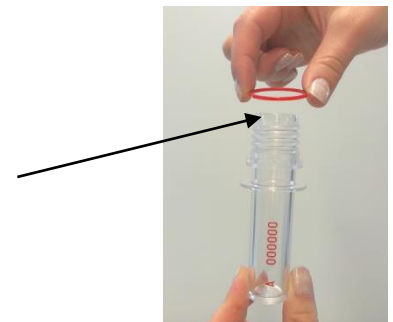

Komplektācija

Plastikāta maisiņā ir:

- 1 plastmasas trauciņš ar iegravētu melnu unikālo numuru
- 1 drošības korķītis ar to pašu unikālo numuru (baltā krāsā)
- 6 uzlīmes ar to pašu unikālo numuru un svītru kodu
- 1 ūdensizturīgs plastikāta maisiņš ar mitrumu absorbējošu maisiņu
- Lietošanas instrukcija (rozā lapiņa)



Aizvēršanas vadlīnijas

- Asins parauga kontrolieris (BCO) savāc asinis no sportista, vadoties pēc Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) vadlīnijām (http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/2008-06_GuidelinesBloodSample_unmarked.pdf)
- Tiklīdz kā asins paraugs ir savākts, ielieciet stobriņu trauciņā.
- BCO tiešā uzraudzībā sportistam:
 - atkārtoti jāpārliecinās, ka unikālais numurs sakrīt uz visām komplekta sastāvdaļām;
 - jānoņem sarkanais gredzens (kurš aizsargā no nejaušas pudelītes aizvēršanas);
 - Maigi jāaizskrūvē korķītis, spiežot uz leju un griežot pulksteņrādītāja virzienā. (griežot var dzirdēt klikšķus). Jāturpina griezt līdz korķītis vairs nav pagriežams. **Grieziet maigi, nepielietojot pārāk daudz spēka!**
- BCO jāinstruē sportists:
 - mēģināt pagriezt korķīti pret pulksteņrādītāja virzienu, lai pārliecinātos, vai tas ir ciet;
 - mēģināt pacelt korķīti, lai pārliecinātos, ka tas nekustas.

Pēc tam, kad sportists izdarījis iepriekš minēto, BCO atkārti minētos soļus, lai pārliecinātos, ka pudelīte ir aizvērta.



Sagatavošanās transportēšanai uz laboratoriju

- Komplekts satur vienu plastikāta maisiņu ar absorbējošu maisiņu.
- Aizzīmogotais trauciņš jāieliek plastikāta maisiņā (lūdzu atstājiēt absorbējošo maisiņu iekšā).
- Aizlīmējiet plastikāta maisiņu, noņemot uzlīmi no līmējošās malas un uzmanīgi salīmējot abas maisiņa malas kopā.
- Pārliecinieties par to, lai maisiņā būtu pēc iespējas mazāk gaisa – izspiediet to pirms aizlīmēšanas.
- Pēc aizlīmēšanas ielieciet trauciņu plastikāta maisiņā. Asins paraugs jātransportē “aukstajā transporta sistēmā”. Lūdzam ievērot temperatūru un apstākļus, kādos jātransportē asins paraugs (WADA guidelines June 2008, chapter 5.14).

